

“貝特爾”雷射治療器

“BTL” LASER THERAPY DEVICE

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用

型號: BTL-5000 Laser, ~~BTL-4000 Laser~~ ^X 107.11.01
註銷規格

衛署醫器輸字第 020074 號

1) 產品說明:

本產品可以提供單頻 LLLT 雷射治療，由使用者設定的治療程序。可以預先設定不同治療程序。BTL-4000 Laser 另內建可充電式電池。

2) 適應症:

可用於減緩疼痛，幫助傷口癒合。

注意：本機台僅限訓練合格之物理治療師及醫師使用。

3) 禁忌症:

- 治療眼睛週圍部位時，可能會直接照射到眼睛及視網膜造成受損。
- 月經期間。
- 有腫瘤疾病的病患。
- 因為照射患處而可能導致癌前的生長 (precancerous growths)。
- 可能會照射病患之耳蝸植入物。
- 可能會照射到腺體及內分泌物。
- 有發燒情況的病患。
- 脈衝模式 (紅光及紅外線照射) 都不適合使用在有癲癇(由於大腦陣發性功能失常)病患。
- 懷孕婦女。
- 皮膚疑似病變處。
- 癌前與已存在之腫瘤。
- 光敏感性皮膚病。
- 慢性皮膚病。
- 皮膚受到 UV 光或輻射治療傷害。
- 高劑量類膽固醇治療後。
- 未治癒的癲癇。
- 有心機能衰退的病患。
- 血液循環不良，冠狀動脈疾病及心律不整。
- 一般感染發燒。
- 使用心臟節律器者。

